

ヒトラクトフェリン コントロール

本品は、ヒトラクトフェリン ラテックス用のコントロール物質です。
本品を使用方法に準じて調製した時のヒトラクトフェリン濃度は、バイアルラベルに表示してあります。

【使用法】

本品 1 バイアルに、1 mL のヒトラクトフェリン希釈液（別売）を加えて溶解します。
1 0 分間静置後、ゆっくり混和してコントロール溶液として使用します。

【使用上、又は取扱上の注意】

1. 皮膚などにつかない様に、注意して取り扱ってください。
2. ロットの異なるコントロールは混和しないで下さい。
3. 期限切れのコントロールは使用しないで下さい。

【貯 法】

2 ～ 1 0 で保存。

【有効期間】

製造日から 2 年間。使用期限は個装箱に表示。

【包 装】

低値コントロール・バイアル 3 本
高値コントロール・バイアル 3 本

発売元 コスモ・バイオ株式会社
東京都江東区東陽 2 丁目 2 番 2 0 号東陽駅前ビル

製造元 フジテックス株式会社
神奈川県横浜市都筑区高山 1 8 - 6



コスモ・バイオ株式会社